

Desinfektion av instrument kommunal vård, vårdhygienisk riktlinje

Exempel på instrument: Pincett, sax, peang, agraffång, sårslöv etc.

Vid tillgång till diskdesinfektor:

- Diska instrumenten i nära anslutning efter användning för att undvika intorkning av organiskt material
- Rent gods plockas ur diskdesinfektor med rena och desinfekterade händer
- Om torkprogram inte finns, lägg instrumenten på tork på ren luddfri duk
- När instrumentet är torrt desinfektera händerna och lägg instrumentet i ren låda med lock, alternativt i ren plastpåse för torr och dammfri förvaring
- Diska höggradigt rena instrument och förvaringslåda i diskdesinfektor 1 gång/vecka

Ingen tillgång till diskdesinfektor:

- Skölj instrumentet i kallt vatten efter användning för att undvika intorkning av organiskt material
- Diska därefter med diskmedel och vatten
- Skölj noga efteråt med vatten för att få bort ev. rester av diskmedlet
- Torka instrumentet helt torrt med ren luddfri duk
- Lägg instrumentet så att det täcks helt av ytdesinfektion, tex isopropanol 45% i minst 15 minuter eller i 70 % etanollösning i minst 10 minuter.
Alternativt koka instrumentet i minst 5 minuter
- Rent gods plockas upp med desinfekterade händer och läggs på tork på ren luddfri duk
- När instrumentet är torrt desinfektera händerna och lägg instrumentet i ren låda med lock, alternativt i ren plastpåse för torr och dammfri förvaring
- Diska höggradigt rena instrument och förvaringslåda 1 gång/vecka

Spoldesinfektor

- Avsedd för rengöring av sugflaskor, bäcken, urinflaskor och hinkar
- Instrument får inte rengöras i spoldesinfektor